

Anwendungstipps unter: www.firstboxcompany.com/downloads

INTRUSOL® AF+



Produkte und Services aus Tirol
www.firstboxcompany.com

Telefon: +43 681 10733038 E-Mail: office@firstboxcompany.com

INTRUSOL® AF+

VAH - zertifiziert
wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid (inkl. M.terrae)
wirksam gegen behüllte Viren (BVDV/Vaccinia, HBV, HIV, HCV)
wirksam gegen unbehüllte Viren (Rota- und Adenoviren, SV 40, sowie MRSA)
gute Materialverträglichkeit
angenehm im Geruch, keine schädlichen Luftbelastungen
gute Hautverträglichkeit bei ungewolltem Kurzzeitkontakt mit der Gebrauchslösung
biologisch gut abbaubar

Anwendungskonzentrationen:

Gemäß DGHM/EN

Beispiel mit Wasserglas und Teelöffel:

Ansetzen einer 2% Lösung Instrusol AF+ in einem herkömmlichen

Wasserglas mit 250 ml.

2% => 5 ml Instrusol Af+ => 1 Teelöffel sind 5 ml
3% => 7,5 ml Instrusol Af+ => 1 1/2 Teelöffel sind 7,5 ml
4% => 10 ml Instrusol Af+ => 2 Teelöffel sind 10 ml



Wirkt gegen:	Konzentration:	Einwirkzeit:
bakterizid, fungizid, tuberkulozid, incl. M.-terrae	2 %	60 Min.
	3 %	30 Min.
	4 %	15 Min.
im Ultraschallbad	3 %	5 Min.
BVDV/Vaccinia	2 %	15 Min.
Adeno	4 %	120 Min.
Rota	2 %	5 Min.
Simian virus SV 40	3 %	30 Min.

Aufbereitungshinweise:

Einlegeverfahren:

Instrumente sofort nach Gebrauch einlegen. Sämtliche Oberflächen und Hohlräume müssen bedeckt bzw. befüllt sein. Die Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten beachten. Instrumente entnehmen, gründlich mit Wasser abspülen und trocknen.

Ultraschallbad:

Es ist der vorgeschriebene Frequenzbereich und die vorgegebene Desinfektionsdauer einzuhalten. Wassertemperaturen über 45°C sind zu vermeiden.

Biologische Abbaubarkeit:

Instrusol AF+ ist nach den Kriterien der OECD biologisch abbaubar.
Die Instrusol AF+ Gebrauchslösung kann mit dem allgemeinen Abwasser entsorgt werden.

Chem.-physikalische Daten:

Aussehen: klare, leicht bernsteinfarbene Flüssigkeit

Dichte: ca. 1 g/ cm³

pH-Wert: ca. 9,5

pH-Wert der 1%-igen Gebrauchslösung: ca. 8,0

Anmerkung:

Die Gebrauchslösung von Instrusol® AF+ ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Die Gebrauchslösung ist nicht ätzend.

Im Konzentrat wirkt Instrusol AF+ ätzend auf Haut und Augen.

Wir empfehlen daher, die im Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten

und die übliche Schutzkleidung zu tragen, vor allem wird das Tragen von Schutzhandschuhen aus Nitril empfohlen.

Bei Fragen:
office@firstboxcompany.com
Mobil: +43 681 10733038
WhatsApp: +43 681 10733038

Medizin- und Pflegeprodukte bestellen unter:
www.firstboxcompany.com



Bankverbindung:

Sparkasse Rattenberg Bank AG
IBAN: AT93 2050 8000 0003 3365
BIC: SPRTAT21XXX
UID-Nr.: ATU74678716
EORI-Nummer: ATEOS1000133021

FIRST BOX COMPANY

inh. Laura Mixner
Fachhandel für Medizin- und Pflegeprodukte
GISA-Zahl: 35864615
Adresse: Oberdorf 577 | 6232 Münster | Austria
Telefon: +43 681 10733038
E-Mail: office@firstboxcompany.com